

勃起操作：如图 1 所示，用手指挤压液压泵到底，然后松开，重复此动作，一般 3-4 次即可完全勃起，也可挤压至完全满意时为止。

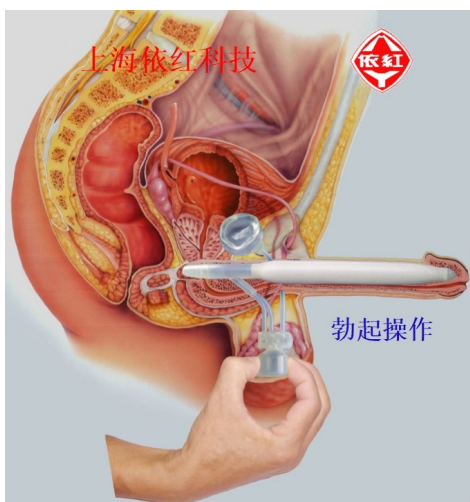


图 1：勃起操作

泄放操作：如图 2 所示，用一只手按住控制按钮不放，用另一只手逐渐握紧阴茎施压，到阴茎完全疲软后将按捏控制按钮放开，再放开握紧阴茎的手。注意：按捏控制按钮到平即可。

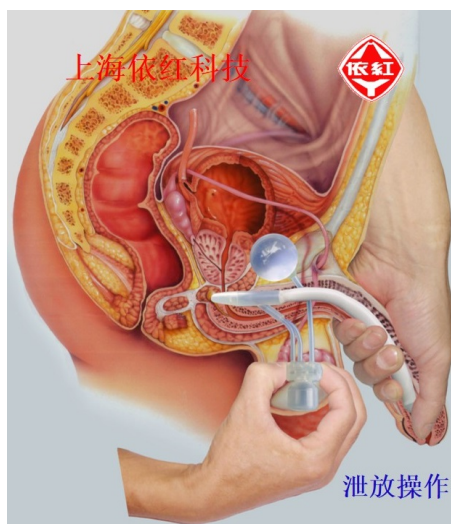


图 2：泄放操作

植入后勃起与泄放合成图，如图 3 所示。

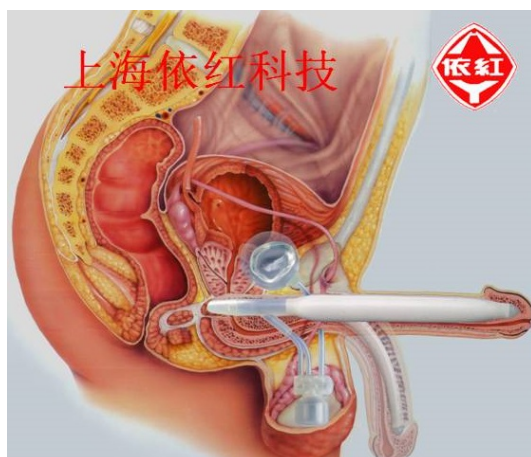


图 3 勃起与泄放合成图